



UTILISATION PRÉVUE

Ce dispositif est destiné à l'évaluation de la sensibilité aux vibrations

MODE D'EMPLOI

Le dispositif est présenté dans des emballages non stériles

Préparation

1. Ouvrir l'emballage contenant le dispositif VibraTip®
2. Retirer VibraTip® de l'emballage et vérifier l'état
3. Tester VibraTip® en appuyant brièvement sur le bouton d'activation et vérifier que l'appareil vibre
4. Nettoyer VibraTip® avec un coton imbibé d'alcool

Application

1. Tenez VibraTip® fermement entre le pouce et votre index
2. Touchez doucement la peau intacte du patient avec le bout arrondi de VibraTip® à deux reprises, chaque fois pendant environ 1 seconde, en expliquant que «ceci est le premier toucher» et «ceci est le second toucher». Activez VibraTip® de manière aléatoire sur le premier ou le deuxième contact en serrant l'appareil fermement entre le pouce et votre index
3. Demandez au patient auquel des deux touchers ont été associées les vibrations
4. Nettoyez VibraTip® entre chaque utilisation avec un coton imbibé d'alcool

Précautions

- VibraTip® doit être appliqué uniquement sur peau intacte
- VibraTip® ne doit pas être appliqué sur des muqueuses
- VibraTip® ne doit pas être inséré dans l'urètre, l'oreille ou autre orifice du corps
- VibraTip® doit être tenu à l'écart de l'oeil
- Ne laissez pas d'alcool provenant du nettoyage des tampons ou d'autres liquides s'infiltrer dans le compartiment à piles de VibraTip®
- Ne jamais plonger VibraTip® dans un liquide, ceci pouvant entraîner des dommages irréversibles
- VibraTip® ne doit pas être placé dans un four à micro-ondes ou un autoclave
- Toujours jeter VibraTip® avec précautions

Information sur les brevets :

GB #2462652, demande de brevet européen #09784932.7, USA demande de brevet #13/059214, demande de brevet indien # 1252/DELNP/2011, Demande de brevet chinois #200980140857.0

Marques déposées : UK 2514506. US 85695637

Distributeur mondial : McCallan Medical Ltd, Nottingham UK NG2 7PP