

Merci d'avoir acheté les nouveaux protecteurs de hanche confortables et efficaces Fall-Safe®

Non seulement ces protecteurs Fall-Safe® vont vous apporter une protection optimale, mais bientôt vous ne remarquerez même plus leur présence, ni le jour, ni la nuit.

Comment peuvent-ils être si doux et confortable, et pourtant si efficace?

Les protecteurs de hanche Fall-Safe utilisent un nouveau matériau unique et breveté appelé D3O®, qui absorbe les chocs beaucoup plus efficacement que les mousses, textiles, polyuréthane ou les plastiques durs qui sont généralement utilisés dans des protecteurs de hanche. Au moment de l'impact les molécules de d3o s'emboîtent instantanément pour absorber la charge, puis se détendent dans leur état fluide, permettant aux protecteurs de hanche d'épouser confortablement la forme votre corps. A titre de comparaison, voir le graphique ci-après.

Instructions

Insertion dans les culottes

Les protecteurs de hanche Fall-Safe sont conçus pour s'intégrer facilement dans chacune des poches à l'intérieur de la culotte fournie. Avant d'insérer le protecteur dans la culotte, avec une main pliez le protecteur de hanche autour de son axe le plus long puis, tout en ouvrant la poche de la culotte de l'autre main, insérez le protecteur de hanche dans la poche. Assurez-vous que l'extrémité la plus étroite est au fond de la poche et que l'écriture en relief dirigée vers l'extérieur, et n'est pas à l'envers. Voir ci-dessous.




Culotte unisexe avec des protecteurs de hanche Fall-Safe

Résultats d'une série de tests dans un laboratoire indépendant en 2011, en utilisant le système développé par la SDMA, les résultats ont été vérifiés par des essais menés à l'Université d'Amsterdam en 2012

Comparison of hip protectors

510mm drop with Peak Force 3.48 kN

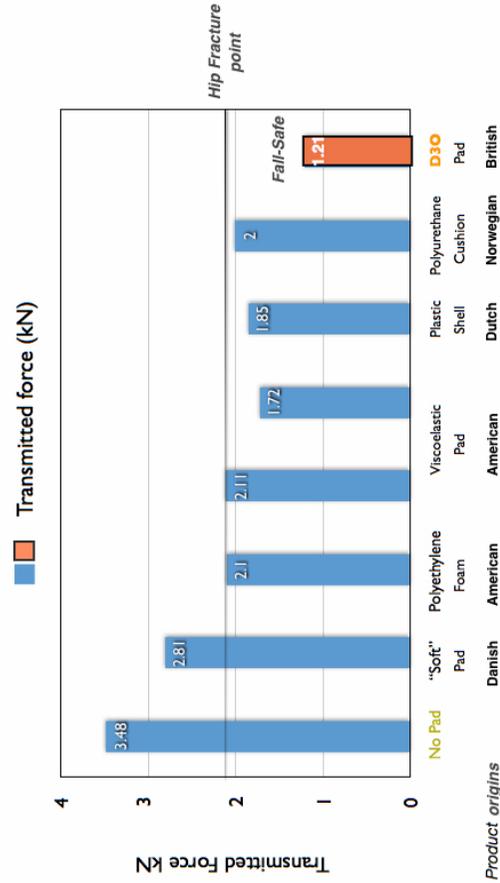

Remarque: les protecteurs de hanche FallSafe® ont été conçus pour réduire les risques de fracture de hanche lors d'une chute, mais HIP Ltd et ses distributeurs ne sauraient être tenus responsables si une fracture ou toute autre conséquence de chute devait se produire.

Instructions de lavage

Commencez par retirer les protecteurs de hanche de la culotte. Ils ne doivent jamais être lavés en restant dans la culotte.

Les culottes doivent être lavées dans un cycle normal de la machine à 60 ° C. Les coussinets protecteurs de hanche doivent être lavés en machine, utilisant de la poudre de lavage normal, à 60°C, pendant 15 minutes. La machine doit ensuite être réglée manuellement pour vidanger. Les coussinets doivent être séchés à l'air, pas au sèche-linge, car cela pourrait les endommager. Ils peuvent être lavés à la main.

Prendre soin des protecteurs de hanche

- Stocker à température ambiante
- Tenir à l'écart de la lumière directe
- Ne pas exposer à une flamme ou à des instruments tranchants
- Insérez et retirez les protecteurs avec soin

Les protecteurs de hanche **Fall-Safe** sont non toxiques et durables. Durée de vie moyenne de 3 ans. Ils sont insensibles aux piqûres ou éclatement, et ne se dégradent pas après plusieurs impacts.



INNO3MED

2 Rue Louis Blériot

78130 Les Mureaux

Tel : + 33 (0) 9 53 50 59 78/ + 33(0) 6 26 46 12 16

www.inno3med.fr