


Comment charger PARO

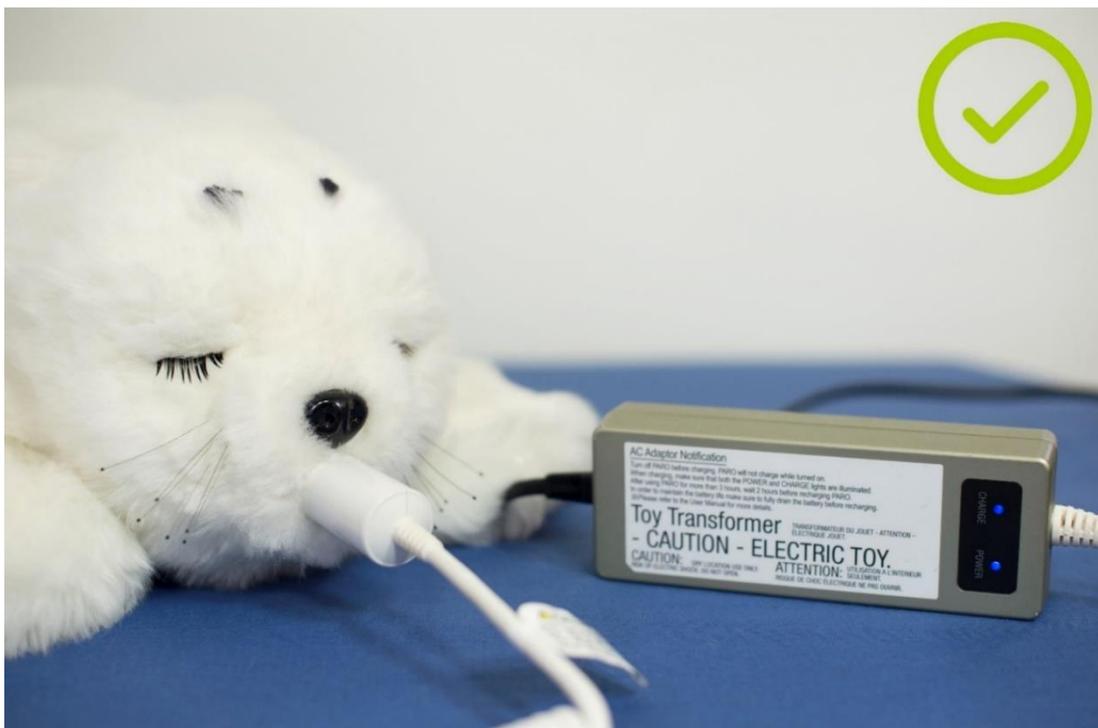

1. Éteindre PARO.
2. Brancher le chargeur sur le secteur et vérifier que la prise électrique est bien alimentée :
 - Si le voyant bleu « POWER » ne s'allume pas : faire un essai sur une autre prise électrique
 - Si le voyant bleu « POWER » s'allume : passer à l'étape suivante ->
3. Introduire l'embout chargeur dans la bouche de PARO :
 - Maintenir la tête pour enfoncer efficacement le chargeur
 - Si vous utilisez la « tétine » - ce qui est facultatif – faites attention au sens d'introduction (voir les photos ci-dessous)
4. Les deux voyants bleus du chargeur – « POWER » et « CHARGE » sont allumés : PARO se charge.
5. Le voyant bleu « CHARGE » s'éteint : PARO est chargé.

► PARO peut être utilisé avec le chargeur dans la bouche. Veuillez noter que dans ce cas, la batterie ne se recharge pas.



Autonomie de la batterie : de 5 à 8 heures - Temps de recharge : 2 à 3 heures