

Comment nettoyer PARO



PARO se nettoie quotidiennement à l'aide du kit fourni.



1. Éteindre PARO avant le nettoyage.

2. Pulvériser la fourrure avec une solution antiseptique diluée type Hexamidine® 1/1000 (dilution dans l'eau 1/50), ou CYTEAL® (dilution dans l'eau 1/50), tout en évitant la bouche et son contour pour ne pas endommager le mécanisme de chargement :



3. Essuyer avec une serviette ; l'utilisation d'une serviette microfibre permet un séchage plus rapide de la fourrure :



4. Si nécessaire, le contour de la bouche de PARO peut être nettoyé avec un gant de toilette à usage unique humidifié avec la solution Hexamidine® 1/1000.

► Si nécessaire ou doute, effectuer le nettoyage quotidien avec de l'Hexamidine® 1/1000 dilué à 2/50 puis compléter en appliquant sur la fourrure une lingette germicide de type Clinell®.

5. Une fois sèche, brosser la fourrure avec une brosse douce :



► Si une tâche apparaît, l'enlever tout de suite avec une serviette propre ; si nécessaire, pulvériser la solution diluée sur la tâche et essuyer de nouveau avec une serviette et brosser doucement la fourrure.