

Précautions principales d'utilisation 1/2




- Prendre connaissance et lire en détail le manuel d'utilisation et le livret de formation.
- PARO doit faire l'objet d'un accompagnement par un membre de l'équipe et ne doit pas être laissé sans surveillance auprès des résidents.


- Ne pas insérer de corps étranger ou de liquide à l'intérieur de PARO :




- Soulever PARO au niveau du ventre, pas au niveau des nageoires :

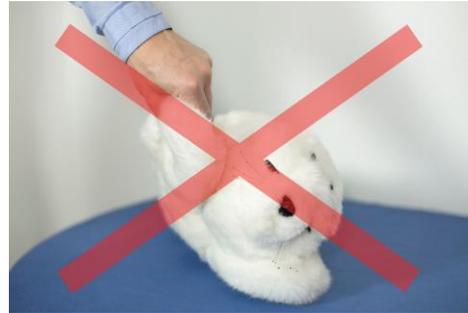

- Ne pas tirer sur les moustaches, ni sur la fourrure ou fortement sur les nageoires, ne pas toucher les yeux :

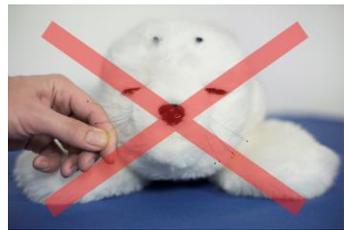

- Ne pas interférer avec les mouvements naturels de PARO :

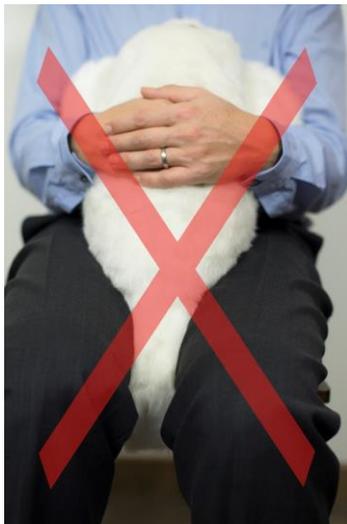



- Éviter les chutes.
- Garder les moustaches de PARO à distance des yeux de l'utilisateur.
- Ouvrir PARO uniquement pour procéder au changement de volume sonore.
- Ne plus utiliser PARO si vous remarquez que les nageoires arrières ne fonctionnent plus, si le nez se détache ou si vous remarquez un bruit, comportement ou odeur inhabituels.
- Éviter les environnements humides, poussiéreux ou une chaleur excessive.
- PARO ne sait pas nager...

Contre-indication

Bien que PARO soit équipé d'un blindage électromagnétique, utiliser à distance de la poitrine si utilisation de pacemaker.

