



Activation de PARO

- Poser PARO sur une surface plane comme une table ou le sol de manière à ce que **PARO repose sur son ventre**.

- **Pour activer PARO :**


Appuyer sur le bouton on/off pendant une seconde entre les nageoires arrière de PARO.

Après quelques instants, PARO commence à bouger.

- **Pour arrêter PARO :**

Appuyer sur le bouton on/off pendant 3 secondes entre les nageoires arrière de PARO.

PARO se mettra en position de repos et émettra un son doux, indiquant qu'il va s'arrêter pour aller dormir.

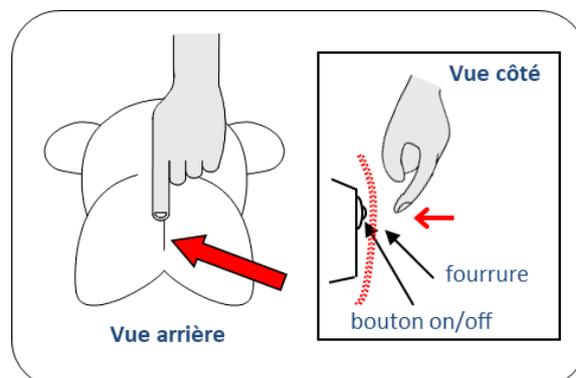

Le bouton on/off est situé entre les nageoires arrière

Note :

Ne pas positionner PARO sur le côté ou à l'envers lorsque vous l'allumez : vous êtes susceptibles de l'endommager.

Réglage du volume sonore de PARO



1. Ouvrir la fermeture éclair de la fourrure qui se trouve sous PARO.



2. Soulever le couvercle de la trappe située côté queue.



3. Allumer PARO afin de régler le volume au niveau souhaité. Le volume se règle en appuyant sur les triangles :

△ UP – pour augmenter le volume

▽ DOWN – pour diminuer le volume

4. Une fois le volume souhaité atteint, refermer la trappe ainsi que la fermeture : PARO est prêt à être utilisé.